

myFREEDM Therapie Sohlen bei Hufrehe

Die **myFREEDM Therapie Sohlen** sind bei Laminitis ein mittlerweile bewährtes, mehrfach wirkendes und einfach anzuwendendes Mittel gegen die Hauptbeschwerden:

Der Akutfall:

Bei akut auftretenden starken Schmerzen, Pulsation, deutlicher Wärme im Huf und sichtbarem Wendeschmerz ist Alarm: Hufreheschub! Die nun eingeleiteten Sofortmaßnahmen können nicht nur die schmerzhafteste Phase abkürzen, sondern auch schlimme Folgeschäden wie Hufbeinverlagerung (Rotation oder Senkung) verhindern.

Zu diesen Maßnahmen gehören neben der Versorgung mit Schmerzmitteln / entzündungshemmenden Mitteln:

- Sofortiges Unterbinden von evtl. Grasaufnahme und Weglassen aller Futtermittel außer portioniertem, gewaschenem Heu
- Hufe weich stellen
- Hufe bis über die Fesseln möglichst ununterbrochen kühlen – bis zu 72 Stunden nach Auftreten des Schubs
- Pferd möglichst ruhig halten und Zwangsbewegung (auch durch Herdenmitglieder) verhindern

Der Einsatz der myFREEDM Therapie Sohlen ist ein ausgezeichnetes Mittel um

- sofort und unkompliziert zuverlässig zu polstern – diese Einlegesohlen drücken sich nicht zu schnell platt, die dämpfende Wirkung hält sehr lange an
- notwendigen, aber schonenden Gegendruck auf das Hufbein auszuüben, so dass es möglichst an einer Verlagerung gehindert wird
- durch die passgenaue Unterpolsterung den Hufbeinträger zu entlasten und auch hiermit einer Verlagerung des Hufbeins durch die Auflösung der Anbindung entgegenzuwirken

Warum unterscheiden sich myFREEDM Sohlen hierin von anderen Einlegesohlen?

- Das Material hält lange Stand und hat die Fähigkeit, sich immer wieder zurück zu formen. Viele andere Einlagen sind rasch plattgedrückt, so dass der Huf keine Unterstützung erfährt.
- Das Material hat die Eigenschaft „Energierückgabe“, was bedeutet, dass die Auftrittsenergie des Hufes zu einem Teil wieder zurückfließt und so eine sehr positiv wirkende Massage auf die Hufunterseite und die Strukturen ausgeübt wird
- Das Material hat eine enorme Stoßdämpfung, die für sofortige Schmerzlinderung sorgt. So wird der Stress für das Pferd minimiert und die Heilung kann beginnen

Wie werden myFREEDM Therapie Sohlen im Reheschub angewendet?

- Wenn Hufeisen vorhanden sind, einfach die myFREEDM Therapie Sohle in der entsprechenden Größe in die Hufeisen legen und anziehen
- Wenn keine Hufeisen vorhanden sind, die myFREEDM Therapie Sohle mittels starkem Tape (Klauenband z.B.) am Huf befestigen und einen eng sitzenden Hufverband anlegen

In beiden Fällen ist die Dauerkühlung mit Eis oberhalb der Hufeisen bzw. des Verbands dennoch möglich und wirksam.



myFREEDM Therapie Sohle mit deutlich sichtbarem Hufprofil im Hufschuh



myFREEDM Therapie Sohle mit deutlich sichtbarem Hufprofil nach einem Tag im Hufschuh



Hufrehe-Hufe: Mit myFREEDM Therapie Sohlen schneller zurück ins hufgesunde Leben!



Hufrehe-Beratung:
beratung@myfreedm.de